

COLDISEPT NANO SILVER

Ausų lašai

Medicinos priemonė ausų lašų forma, naudojama bakterijų ir grybelių infekcijos sukkelto išorinio ausies kanalo uždegimo gydymo papildymui.

COLDISEPT nanoSILVER ausų lašai yra skirti naudoti į išorinį ausies kanalą, siekiant suminkštinti bei pašalinti bet kokius nešvarumus ir ant odos paviršiaus sukurti apsauginį barjerą. Priemonėje yra sidabro ir vario nanodalelių, kurios riboja bakterijų ir grybelių augimą. COLDISEPT nanoSILVER ausų lašai papildo įvairių priežasčių sukkelto išorinės ausies uždegimo gydymą.

SUDEDAMOSIOS DALYS

Išgrynintas vanduo, glicerolis, propilenglikolis, nanokoloidinis sidabras, nanokoloidinis varis.

ŠALUTINIS POVEIKIS

Šalutinis COLDISEPT nanoSILVER ausų lašų poveikis nėra žinomas, tačiau negalima paneigti alergijos simptomų atsiradimo galimybės, ypač jautriems asmenims. Jei pasireiškia alerginė reakcija, nutraukite priemonės naudojimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nenaudokite priemonės, jei esate alergiški bet kokiai sudedamajai daliai.

Nenaudokite priemonės, jei ausies būgnelis yra praplyšęs.

Dozatoriaus neikiškite per giliai į ausies kanalą.

Saugokitės nuo atsitiktinio sąlyčio su akimis ir burna.

Jei pasireiškia bet kokių nerimą keliančių simptomų, priemonės naudojimą nutraukite. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui!

Nėščioms moterims ir jaunesniems kaip 6 metų vaikams priemonę galima naudoti tik prižiūrint medikui.

Apie bet kokią su priemone susijusį sunkų incidentą būtina pranešti gamintojui ir

šalies, kurioje naudotojas gyvena, kompetentingai institucijai. **Kompetentinga nacionalinė sveikatos priežiūros institucija:** Valstybinė akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS

COLDISEPT nanoSILVER ausų lašai naudojami tris kartus per parą ir ne trumpiau kaip 3 dienas po to, kai išnyksta uždegimo simptomai.

Švelniai sušildykite buteliuką (geriausia delnais).

Atsigulkite taip, kad ausis būtų nukreipta aukštyn.

Įlašinkite 5 lašus (nebent gydytojas nurodė kitaip) ir tokioje padėtyje pabūkite 3-5 minutes. Naudokite atsižvelgdami į individualų poreikį.

LAIKYMAS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

15 ml pakuotė

Pagaminta ES pagal: Alpen Pharma AG, Bern, Šveicarija užsakymą